

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/cisnieniomierz-zegarowy-standard-bez-stetoskopu-w-etui-p-599.html>

Ciśnieniomierz zegarowy STANDARD bez stetoskopu, w etui



Cena	43,90 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Ciśnieniomierz zegarowy Standard - bez stetoskopu

Ciśnieniomierz Standard, oferowany przez sklep Omnibus, to najbardziej rozpoznawalny aparat do pomiaru ciśnienia, uznawany za najbardziej wiarygodne urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi. Metoda pomiaru ciśnienia krwi, którą wykonywane jest badanie, daje pewność, że pomiary ciśnienia są prawidłowe.

Aparat umożliwia pomiar ciśnienia krwi oraz jednocześnie odsłuchiwanie odgłosów serca za pomocą stetoskopu. Ciśnieniomierz manualny zegarowy Standard może być stosowany zarówno do użytku domowego jak i w gabinetach lekarskich.

Ciśnieniomierz STANDARD to idealna kombinacja:

- niezawodności
- łatwej obsługi
- atrakcyjnej ceny
- precyzyjny manometr skala do 300 mmHg
- CZYTELNA, PRZEJRZYSTA TARCZA O ŚREDNICY 45MM
- wygodny, uniwersalny mankiet, zapinany na rzep z metalowym ringiem
- w zestawie wygodne i trwałe etui

Do prawidłowego pomiaru ciśnienia niezbędny jest stetoskop - dostępny w innej ofercie oddzielnie.

Dlaczego warto stosować dobry ciśnieniomierz zegarowy ?

W naszych tętniczych naczyniach krwionośnych potrzebne jest pewne ciśnienie, aby krew nadal krążyła w układzie krążenia. Każde uderzenie serca wywołuje falę ciśnienia, która jest przenoszona do tętnic i może być odczytana przez ciśnieniomierz zegarowy Standard. Regulacja ciśnienia krwi odbywa się poprzez wzajemne oddziaływanie wielkości naczynia, pojemności minutowej serca i objętości krwi. Wiele osób ma wysokie ciśnienie krwi i znajduje się powyżej krytycznego limitu - aby je kontrolować, trzeba zakupić dobry ciśnieniomierz ze stetoskopem.

Dlatego należy regularnie używać ciśnieniomierza zegarowego?

Wysokie ciśnienie krwi, które utrzymuje się przez długi czas, uszkadza serce i naczynia krwionośne. Z tego powodu od 18 roku życia należy mierzyć ciśnienie krwi przynajmniej raz w roku. Możesz do tego użyć ciśnieniomierza zegarowego ze stetoskopem Standard.

Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) może mieć następujące konsekwencje:

- naczynia krwionośne twardnieją i gęstnieją.
- ryzyko zawału serca lub udaru wzrasta od dwóch do dziesięciu razy.
- mogą wystąpić choroby wtórne, takie jak zawał serca, niewydolność serca, udar, niewydolność nerek, zaburzenia krążenia w nogach i słaby wzrok.

Czym wyróżnia się ciśnieniomierz zegarowy Standard ?

Ergonomiczna gruszka z pompką o klasycznym wyglądzie sprawia, że jest szczególnie przyjazna dla użytkownika.

Manometr odporny jest na korozję i wstrząsy.

Cięśnieniomierz zegarowy idealnie sprawdzi się zarówno do codziennego, domowego użytku jak i użytku klinicznego.

Jak mierzyć ciśnienie aparatem zegarowym Standard?

- usiądź wygodnie i załóż mankiet na lewą rękę tak aby przewód był dokładnie w linii ze środkiem dłoni. Pamiętaj ! nie możesz zacisnąć mankieta, trzeba zostawić luz żeby nie wytworzyć ciśnienia w mankiecie.
- Jeżeli masz stetoskop to teraz możesz wsadzić główkę pod mankiet w miejscu zgięcia łokcia
- zakręć zawór, który znajduje się tuż przy gruszce
- napompuj mankiet do co najmniej 180 mmHg
- delikatnie odkręć zawór aby wskazówka na manometrze zaczęła spadać do 0 mmHg
- teraz nasłuchuj w stetoskopie. Kiedy usłyszysz pierwsze uderzenie to będzie to pierwsza dana którą zapamiętaj. Będzie to ciśnienie skurczowe
- wskazówka musi nadal spadać. Będziesz słyszał w słuchawkach uderzenia.
- Ostatnie uderzenie które usłyszysz to będzie wartość ciśnienia rozkurczowego.
- możesz odkręcić zawór mocniej, aby szybko spadło pozostałe ciśnienie z mankieta. Pamiętaj nie spuszczać ciśnienia z mankieta poprzez ściskanie go dłońmi. To spowoduje uszkodzenie manometru ponieważ wytworzysz wyższe ciśnienie niż 300 mmHg. Wystarczy że odkręcisz zawór i pozostawisz mankiet. Ciśnienie samo spadnie

Gwarancja 24 miesiące