

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/zestaw-katarek-complete-secureaspirator-kataru-podlaczany-odkurzacza-p-886.html>

ZESTAW Katarek Complete Secure+ Aspirator kataru podłączany odkurzacza



Cena	65,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

ZESTAW NA KATAR KATAREK COMPLETE SECURE+

Katarek Complete Secure+ to zestaw na katar, który zawiera aspirator kataru podłączany do domowego odkurzacza, **20 ampułek soli fizjologicznej Katarek Secure+**, oraz zestaw akcesoriów a wszystko to zamknięte w wygodnym plastikowym pudełku.

Uzupełnieniem zestawu jest [sól fizjologiczna Katarek Secure+](#). Ampułka tej soli, dzięki innowacyjnej, kulistej budowie aplikatora jest bezpieczniejsza w użyciu i bardziej precyzyjna w aplikacji od standardowych ampułek. Jest to spowodowane tym, że po otwarciu nie powstają ostre krawędzie, które mogłyby zranić dziecko.

Aspirator kataru podłączany do odkurzacza pozwala na odciągnięcie z nosa dziecka kataru. Jest to bardzo ważne, gdyż małe dzieci nie umieją jeszcze samodzielnie wydychać nosa. Aspiratora można używać już od pierwszych dni życia dziecka.

Kompletny Zestaw

Katarek Complete Secure+ to nie tylko aspirator kataru podłączany do odkurzacza ale, dzięki soli fizjologicznej Katarek Secure+, kompletny zestaw do prawidłowej aspiracji kataru u dzieci!

1. Użyj soli fizjologicznej aby rozcieńczyć katar w nosie dziecka
2. Użyj aspiratora aby odciągnąć wydzielinę
3. Nawilż śluzówkę nosa dziecka po aspiracji solą fizjologiczną



Wygodne przechowywanie

Katarek Complete Secure+ zapakowany jest w poręczne i wytrzymałe opakowanie-pudełko w kształcie apteczki. Opakowanie pozwala na wygodne przechowywanie nie tylko aspiratora ale także zestawu akcesoriów i soli fizjologicznej. Dzięki poręcznemu kształtowi i wytrzymałej konstrukcji możesz wygodnie przechowywać nieużywany zestaw w domu a także bezpiecznie zabrać go ze sobą w podróż albo na wakacje, nie martwiąc się, że uszkodzisz aspirator.

Zawartość zestawu

- Aspirator kataru z rozkręcaną komorą.
- Dwie końcówki do aspiratora
- Szczoteczka
- Katarek Secure+ roztwór soli fizjologicznej (20 ampułek po 5 ml).

Kompleksowy zestaw do aspiracji kataru u dzieci

Aspirator kataru z rozkręcaną komorą:

To główny element zestawu, który służy do usuwania kataru z nosa dziecka. Aspirator jest podłączany do domowego odkurzacza, a jego moc ssąca jest redukowana w komorze do wartości bezpiecznych dla dzieci. Komora jest rozkręcana, co ułatwia czyszczenie aspiratora po użyciu. Aspiratory Katarek pomagają mamom w całej Polsce już od prawie 20 lat!

Dwie końcówki:

Końcówki są niezbędnym elementem aspiratora, które są przykładane bezpośrednio do dziurek nosa dziecka w celu aspiracji kataru. Jeśli aspirator jest używany przez więcej niż jedno dziecko, dwie końcówki minimalizują ryzyko wzajemnego zakażenia się oraz poprawiając higienę odciągania kataru.

Szczoteczka:

Szczoteczka służy do dokładnego czyszczenia aspiratora po użyciu. Dzięki niej można łatwo usunąć resztki kataru i inne zanieczyszczenia, zapewniając higienę urządzenia.

Katarek roztwór soli fizjologicznej (20 ampułek po 5 ml):

Ampułki soli Katarek Secure+ posiadają innowacyjne, okrągłe zakończenie, które jest pozbawione ostrych elementów, zwiększając tym samym bezpieczeństwo i precyzję zakrapiania. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci. Roztwór soli fizjologicznej jest pomocny do prawidłowego przeprowadzenia aspiracji kataru z małego noska. Służy do rozrzedzenia wydzieliny w nosie dziecka przed aspiracją oraz do nawilżenia nosa po zakończonym procesie. Ampułki są jednorazowego użytku, co zapewnia higienę i bezpieczeństwo aplikacji.

Katarek Complete Secure+ Kompletny zestaw do aspiracji kataru u dzieci

Aspirator Katarek Complete w połączeniu z solą Katarek Secure+ tworzy kompleksowy zestaw, który pozwoli nie tylko odciągnąć katar u dziecka, ale także pozwoli na przeprowadzenie tego zabiegu w najbardziej kompletny sposób zgodnie z Metodą 3 kroków.

Silny w walce z katarzem:

Dzięki sile ssącej odkurzacza, aspirator skutecznie radzi sobie z katarzem, nie tylko lekkim i wodnistym ale też gęstym i uporczywym.

Delikatny dla nosa:

Moc ssąca odkurzacza jest zredukowana w komorze aspiratora. Sprawia to, że aspirator Katarek może być używany u dzieci nawet od 1 dnia życia!

Praktyczny w codziennym użyciu:

Rozkręcana komora aspiratora sprawia, że jego czyszczenie jest proste i szybkie, a wygodę etui pozwala na wygodne przechowywanie całego zestawu.

Trwały:

Możliwość dokupienia dedykowanych akcesoriów, takich jak dodatkowe końcówki czy zestawy soli fizjologicznych Katarek sprawia, że zestaw będzie pomagał w walce z katarzem przez długi czas.

Solidny i wygodny:

Zestaw jest starannie zapakowany w trwałe opakowanie w formie apteczki, co gwarantuje jego ochronę a także wygodę w przechowywaniu.

Certyfikowany wyrób medyczny:

Aspirator Katarek Complete Secure+ to wyrób medyczny z certyfikatem CE, co potwierdza jego wysoką jakość.

Metoda 3 kroków - jak poprawnie odciągać katar u dziecka?

Współpracując z lekarzami, stworzyliśmy Metodę 3 Kroków, która kompleksowo dba o małe noski i zapewnia skuteczne oraz łagodne usuwanie kataru:

Krok 1: ROZRZEDZANIE

Roztwór fizjologiczny soli jest kluczem do skutecznego rozrzedzenia kataru. Dzięki temu odciąganie staje się łatwiejsze i bardziej komfortowe dla dziecka. Wystarczy zakropić każdą z dziurek nosa po 2-3 krople soli, na przykład używając soli Katarek Secure+. Ten krok przygotowuje nos do dalszej pielęgnacji.

Krok 2: ODCIĄGANIE

Używając aspiratora podłączonego do odkurzacza, delikatnie przyłóż końcówkę do każdej z dziurek nosa – naprzemiennie, przytrzymując po 3-4 sekundy z każdej strony. Ważne jest, by nie przykładac końcówki zbyt mocno. Dzięki temu krokowi skutecznie usuwamy katar, który zalega w nosie.

Krok 3: NAWILŻANIE

Po odciągnięciu kataru, ważne jest nawilżenie śluzówki nosa. Ponowne zakroplenie każdej z dziurek nosa 2-3 kroplami soli fizjologicznej pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia. Nawilżona śluzówka jest mniej podatna na działanie bakterii, co minimalizuje ryzyko rozwoju infekcji oraz przynosi ulgę.

Metoda 3 Kroków to holistyczne podejście do pielęgnacji noska dziecka. Dzięki niej nie tylko skutecznie usuwamy katar, ale także dbamy o odpowiednie nawilżenie i ochronę przed bakteriami. To proste, ale skuteczne rozwiązanie, które zapewnia komfort i bezpieczeństwo dla Twojego malucha w każdej sytuacji. Dzięki temu, nawet w trudnych chwilach związanych z przeziębieniem, możesz być pewna, że dostarczasz swojemu dziecku najlepszą opiekę.

Sposób użycia Katarka Complete Secure+

1. Podłącz aspirator do odkurzacza o mocy od 600-1800W.
2. Przygotuj jedną ampułkę Katerek Secure+ fizjologiczny roztwór soli. Weź dziecko na kolana i odchyl mu lekko głowę do tyłu. Wpuść od 1 do 2 kropli roztworu do każdej z dziurek.
3. Użyj aspiratora Katerek w celu odciągnięcia wydzieliny (na każdą dziurkę do 5 sekund).
4. Po aspiracji ponownie wpuść od 1 do 2 kropli roztworu do każdej z dziurek.
5. Aspirator rozłóż na części i umyj pod bieżącą wodą.

Mycie i dezynfekcja:

Części aspiratora myj bezpośrednio po użyciu ciepłą wodą o jakości wody pitnej oraz detergentem przyjaznym dla dzieci.

Chcąc zdezynfekować produkt przetrzyj go miękką ściereczką lub wacikiem nasączonym alkoholem etylowym klasy farmaceutycznej.

Zawartość pudełka:

- aspirator kataru z rozkręcaną komorą
- dwie końcówki
- szczoteczka
- Roztwór soli fizjologiczny Katerek Secure+ 20 amp.5 ml.

Aspirator kataru Katerek Complete Secure+

Aspirator kataru podłączany do odkurzacza, przeznaczony dla dzieci już od pierwszego dnia życia.

Z powrotem może być także stosowany w przypadku dzieci niepełnosprawnych oraz osób niewspółpracujących. Aspirator posiada rozkręcaną komorę, dzięki czemu łatwo go umyć. Do zestawu Katerek Complete Secure+ dołączona jest szczoteczka, która pozwala pozbyć się silniejszych zabrudzeń. W zestawie znajduje się także zapasowa końcówka.

Katar jest częstą chorobą występującą u dzieci. Największym problemem jest fakt, iż niemowlęta oraz dzieci nie potrafią same pozbyć się wydzieliny z nosa. Nauka oddychania przez usta oraz nauka wydmuchiwanie nosa wymagają czasu. Wydzielina zalegająca w nosie utrudnia oddychanie, powoduje złe samopoczucie, a także dalsze powikłania: stany zapalne uszu, zatok, jak również zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc. Ważne jest więc udrożnienie nosa poprzez usuwanie powstałej wydzieliny.

Do tego celu znakomitym rozwiązaniem jest Katerek Complete Secure+ – aspirator podłączany do domowego odkurzacza. Siła ssąca odkurzacza jest zredukowana do stopnia umożliwiającego skuteczne usunięcie wydzieliny z nosa, bez obawy o nieprzyjemne odczucie u dziecka.

Odciąganie wydzieliny ułatwia oddychanie, służy zapobieganiu powikłaniom kataru oraz stanowi uzupełnienie leczenia prowadzonego przez specjalistę. Nie można pomijać wizyty u lekarza – przyczynę przewlekłego nieżyty nosa musi stwierdzić specjalista.